


munchkin®

## 母乳コレクターカップ

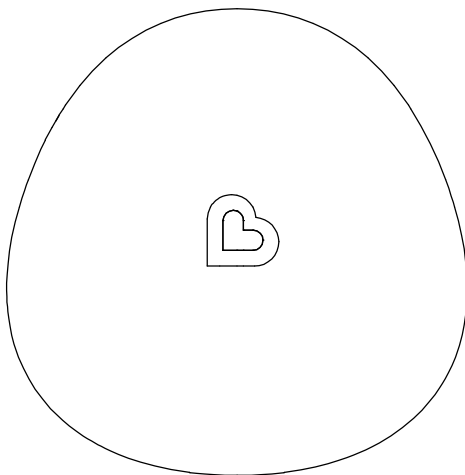

---

この度は、munchkin母乳コレクターカップをお買い上げいただきまして、ありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、必要な時にすぐに取り出せる場所に保管してください。

保管の際はお子さまの手の届かない場所に保管してください。

① 製品を安全にお使いいただくために 製品を安全にお使いいただくために.....	12
⚙️ 同梱品を確認する 同梱品を確認する .....	13
👉 お手入れ方法 はじめてご使用になる前に .....	14
ご使用後.....	14
👉 使用方法 使用方法 .....	15
💬 カスタマーサービス お問い合わせ .....	17



JAPANESE

—

日本語

⚠ 警告：

- 使用する前に必ず本取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
- 本製品は一時的な母乳の収集・保存にのみ使用してください。
- 母乳をすぐに与えない場合は冷蔵庫で保存してください。
- 冷蔵庫（4℃以下）で保存した母乳は24時間以内に飲ませるようにしてください。推奨時間を過ぎて保存した母乳は与えず、捨ててください。


⚠ 注意：

- 破損、変形した製品は使用しないでください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 火気や暖房器具に近づけないでください。
- 鋭利なものとの接触を避けてください。
- 冷凍庫やオープンでは使用しないでください。


【使用上の注意】

- 初めて使用する際は、使用前に必ず取扱説明書のお手入れ方法に従い洗浄、消毒をしてください。
- ご使用前に必ず石鹸で手をしっかりと洗い、清潔なタオルまたは使い捨てのペーパータオルで拭いて、乾かしてください。
- 使用しないときは、本製品をお子さまの手の届かない場所に保管してください。
- 高温多湿、乾燥、温度変化の激しい場所、直射日光を避けて保管してください。
- 使用中に痛みや違和感、その他の問題がある場合は、母乳外来または医師にご相談ください。
- 破損の兆候が見られた場合は、すぐに使用を中止して、新しいものと交換してください。
- 電子レンジは使用しないでください。
- 本製品はおもちゃではありません。大人のみ使用してください。
- 母乳の色やにおいが移る場合があります。

ご使用になる前に、すべての同梱品が揃っていることをご確認ください。

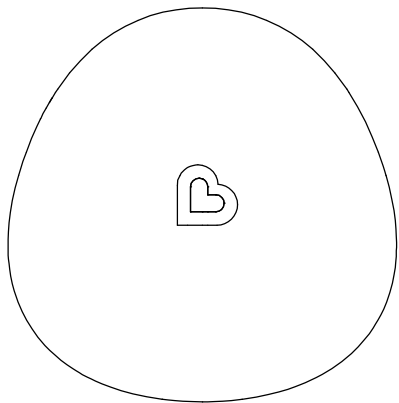

コレクターカップ

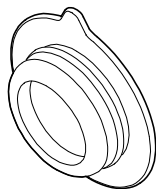

キャップ

## はじめてご使用になる前に

- コレクターカップとキャップを沸騰したお湯に入れ、5分間煮沸消毒してください。※煮沸消毒の際は製品が熱くなります。取扱いに注意してください。
- 取り出した後、10分間冷ましてください。
- 完全に自然乾燥させてからご使用ください。


## ご使用後

- ご使用後は、すぐに各パーツを分解し、ベビー用の食器洗い洗剤で洗ってください。
- 洗浄後は、完全に自然乾燥させてください。
- 食器洗い乾燥機をご使用の場合は、上段に入れてください。
- 鋭利なものとの接触を避けてください。
- 保管する際は、直射日光を避け、涼しく乾燥した場所に保管してください。


**注意：** 製品を洗浄する際は、柔らかい毛のブラシや柔らかいスポンジのみを使用してください。研磨剤入りの洗剤やナイロンブラシ、金属たわし、メラミンスポンジなどは製品を傷つける可能性がありますので、使用しないでください。集めた母乳を温める際は、ほ乳びんに移したのち、ぬるま湯で温めてください。電子レンジは使用しないでください。

## 使用方法

1. 乳首が、コレクターカップの開口部の中心にくるようにセットします。

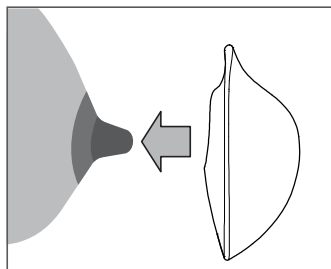


2. コレクターカップを乳房に軽く押し当てて空気を抜き、密着させてください。必要に応じて、快適な位置や吸着しやすい位置に調整してください。

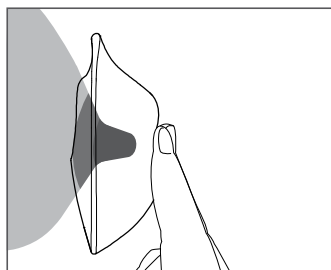


3. コレクターカップの上から授乳用ブラジャーをかぶせます。カップが緩んだと感じたら、再度押し当てて吸着力を高めてください。母乳の分泌が始まった後も、必要に応じて圧を加え直してください。


**注意：急な動きをすると吸着が緩む場合がありますのでご注意ください。**

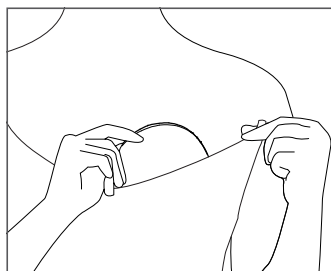

4. 母乳の分泌が始まったら、たまった母乳の量を確認してください。最大容量に達する前に、こぼれないよう少し前かがみになり、コレクターカップを外します。ご使用後は、指を差し込んで開口部の吸着を解除してください。

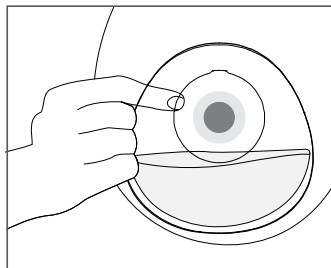

5. 集めた母乳はほ乳びんに移すか、キャップを付けて一時的にコレクターカップに保存してください。汚染を防ぐため、キャップをしっかりと差し込み、漏れがないか確認してください。保存する際は、ハートのロゴが下になるように、ドーム状の面を下にして置いてください。

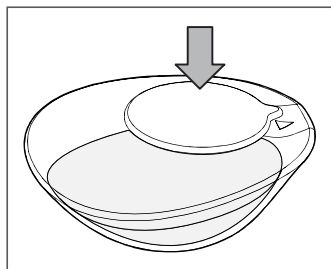

**注意：キャップは、常温または冷蔵庫で一時的に保存する場合にのみご使用ください。**

## お問い合わせ



株式会社ダッドウェイ  
お客さま相談室 0120-880-188 (土日祝休み)  
[www.dadway.com](http://www.dadway.com)



2025 MUNCHKIN, INC., A WHY BRANDS COMPANY. 7835 GLORIA AVE., LOS ANGELES, CA 91406.  
MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 6750 FIFTH LINE, UNIT 1. MILTON, ON L9E 1M9. MADE IN VIETNAM /  
FABRIQUÉ AU VIETNAM. 38184DY\_38184SKY-IS-1