



フローニップルシールド

サイズの測り方

1. 乳首の最も広い部分(乳輪は含まない)の直径を測定します。
正確に測定するため、乳首が刺激された状態で測定してください。
2. 以下のサイズ表を目安にサイズを選んでください。
必要に応じて、「印刷して使えるサイズガイド」をご使用ください。




授乳前の乳首




授乳後の乳首

| 乳首の直径 | 本製品のサイズ |
|-------------|---------|
| 15mm以下 | S 16mm |
| 16mm - 19mm | M 20mm |

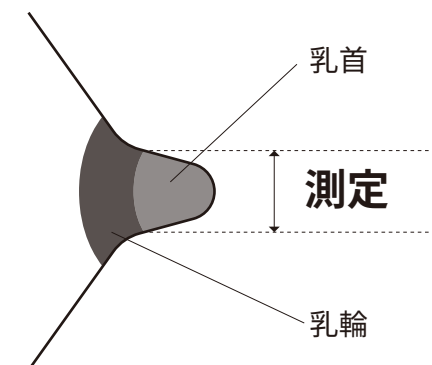


*本ガイドは目安です。授乳時の乳首の変化や形状には個人差があります。
*サイズ選びに迷われた場合は、母乳外来や医師、助産師へのご相談をおすすめします。

印刷して使えるサイズガイド

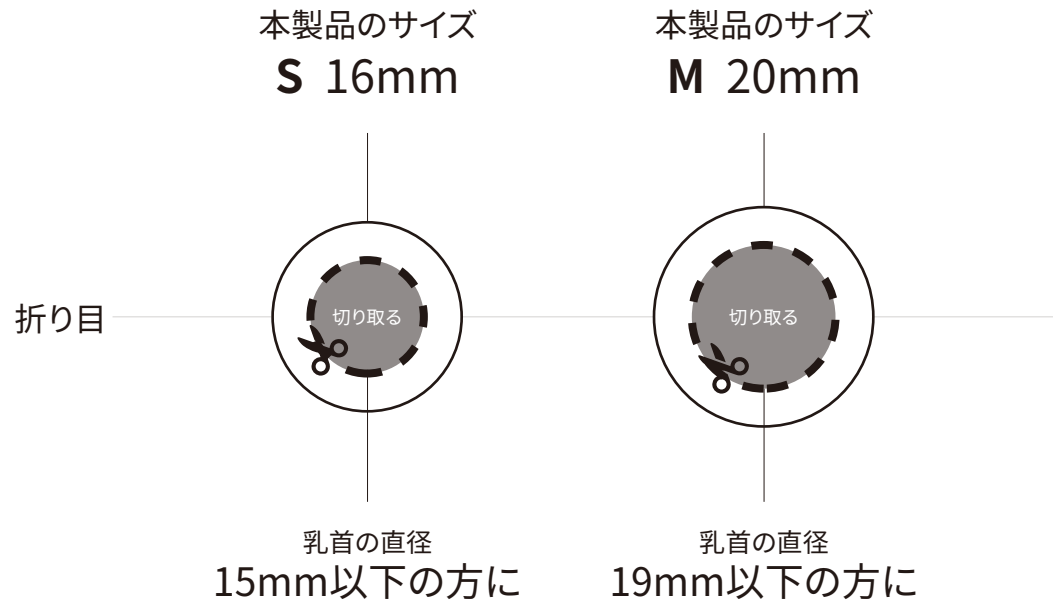

重要


サイズを正確に測定するため、このサイズガイドを100%またはフルスケールで印刷してください。

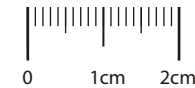

定規を使い、実寸で印刷できているかご確認ください。

折り目の線に沿って折り、丁寧に点線の円を切り取ってください。

1. 乳首をサイズガイドの穴に通してください。
2. 紙が引っかかることなくスムーズに通るサイズが、おすすめサイズです。

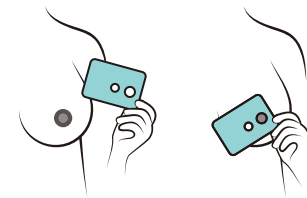

ぴったりと心地よくフィットする
サイズを選んでください。



×
大きすぎる



×
小さすぎる



✓
理想的なサイズ